

Számítógépes Talpbetét Készítés

Tájékoztató

Útmutató a PODOCOMP talpbetét használatához

A számítógépes méretfelvétellel készülő PODOCOMP egyedi talpbetét rugalmas, természetes gumiból készül, bőr bevonattal. A betét optimálisan biztosítja a láb alátámasztását, a statikai elváltozások (lúdtalp, haránt- és bokasüllyedés) korrekcióját. Eredményesen használható a bőrkeményedések, a sarokcsontkinövés ("sarkantyú") kezelésében, valamint az öregujjbütyök és a kalapácsujj kialakulásának megelőzésében.

A betét anyaga és felépítése kellemes komfortérzetet biztosít viselőjének. Ennek ellenére mivel a talpnyomás érzete egyénenként tág határok közt változik – megtörténhet, hogy kezdetben a betét kényelmetlennek tűnik. Ilyen esetben célszerű a lábat fokozatosan hozzászoktatni az áthelyezett nyomáspontok okozta kellemetlenségekhez, azaz első alkalommal a betétet csak 20-30 percig ajánlatos viselni. A továbbiakban ez az idő növelhető, addig, míg a láb tökéletesen alkalmazkodik az új alátámasztáshoz. Előfordulhat, hogy akár egy – két hét is szükséges a teljes alkalmazkodáshoz.

A betét borítása valódi bőrből készül, ami a láb nedvességét magába szívja és egyben természetes szellőzését is biztosítja.

Ezért használaton kívül (éjszaka) célszerű az átnedvesedett betétet, a cipőből kivéve, levegőztetni és napközben harisnyával, illetve zoknival viselni.

NEDVESSÉGTŐL ÓVJUK A BETÉTET !

Tisztítani csak enyhén nedves ruhával szabad!

Utána alapos szobahőmérsékleten történő szárítást igényel!

Erős hőhatás nem érheti a betétet! (hősugárzó, hajszárító,...stb.)

A PODOCOMP talpbetét bármilyen – megfelelő bőségű, 2 -5 cm sarokmagasságú – lábbelibe elhelyezhető.

Állómunkához laposabb, míg járáshoz a magasabb sarkú cipő javasolt. Egészségügyi szempontból nem ajánlott a sarok nélküli lábbeli viselése. Nyitott szandálba, papucsba a betétet ideiglenesen rögzíteni kell, egy mindkét oldalán tapadó ragasztószalaggal. Az 1,5 – 2 cm széles öntapadó szalagot a betét alsó részén, a sarok alatti területre kell ragasztani, majd a védőfóliát eltávolítva lehet a betétet a szandálba, vagy a papucsba helyezni.

Szükség szerint, a betét **orr** részéből szabad levágni ollóval,(meghagyva az eredeti ívet) hogy a cipőbe pontosan illeszkedjen a hossza.

ORKI engedély száma: 345/1994

Jótállási feltételek

A számítógépes méretfelvétellel készülő talpbetétre jótállást vállalunk a következők szerint:

- minőségi, (a hordhatóságot befolyásoló) hibákra / bizonyíthatóan anyaghiba, vagy gyártási hiba esetén /
- pontatlan szerkesztés, vagy alkatrész elhelyezés esetén

Megszűnik a garancia amennyiben:

- a betét megrendelésekor a betét gyártását befolyásoló adatot elhallgattak, vagy pontatlanul adtak meg.
- a betét esztétikáját, vagy funkcióját befolyásoló beavatkozást hajtottak végre
- nem rendeltetés szerű használat, vagy szakszerűtlen kezelés esetén (pl: hajszárító, hősugárzó szárítás)
- a betét túlnedvesedése, mosás, cipőbeázás miatti elváltozások esetén.

JÓ EGÉSZSÉGET KIVÁNUNK !